



ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
1 NOLU BUHAR OTOKLAVI BOWİE-DİCK KAÇAK HAVA TEST FORMU

Doküman Kodu
SDS. FR.03

Yayın Tarihi
25.12.2024

Revizyon Tarihi

Revizyon No

Sayfa Sayısı
1 / 1

BUHAR STERİLİZATÖR NO:

TARİH :

SAAT:

BOWİE&DİCK TESTİ UYGULAYAN PERSONEL ADI SOYADI :

İMZA:

BOWİE&DİCK TEST PERFORMANS

OLUMLU

☐

OLUMSUZ

☐

AÇIKLAMA

BOWİE&DİCK TEST SONUCUNU YAPIŞTIRINIZ

BOWİE&DİCK TEST

PROGRAM DÖNGÜ SONUCUNU
YAPIŞTIRINIZ

BUHAR STERİLİZATÖRÜ VAKUM KAÇAK PERFORMANS TESTİ

VAKUM KAÇAK PERFORMANS TESTİ UYGULAYAN PERSONEL ADI SOYADI/İMZA:

REFERANS DEĞER

Vakum Kaçağı 1 milibar/dakikadan az ise haftada bir kez yapınız.

Vakum Kaçağı 1 milibar/ dakikadan fazla ise her gün yapınız.

Vakum Kaçağı 1,3 milibar/dakika üzerinde ise cihazı çalıştırmayı durdurunuz.

VAKUM KAÇAK TEST PROGRAM
DÖNGÜ SONUCUNU YAPIŞTIRINIZ

OLUMLU

☐

OLUMSUZ

☐

STERİLİZASYON ÜNİTESİ 1 NOLU OTOKLAV BOWİE DİCK*KAÇAK TEST FORMU
KONTROL SORUMLUSU ADI SOYADI İMZA